


FRAISE D'ALGER

Remplacement de la pile ou Batterie sans casser le contact cuivre

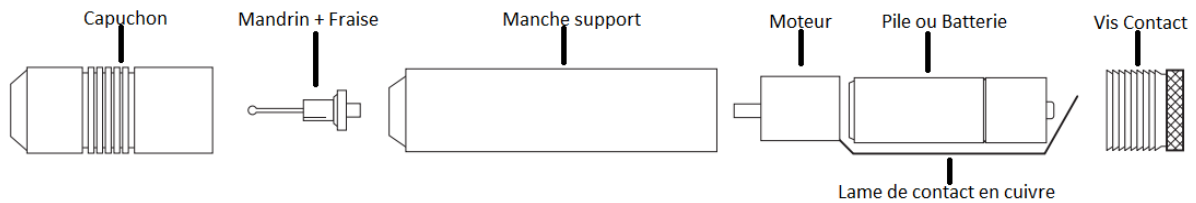

Pour remplacer la pile ou batterie :

- 1.) Enlever le capuchon protecteur.
- 2.) Dévisser et retirer la vis de contact.
- 3.) Retirer le mandrin support de Fraise avec une pince en tirant dans l'axe.

Voir figure 1 :



Figure 1.

- 4.) Faire glisser l'ensemble Moteur et Pile ou Batterie avec la lame de contact en cuivre hors du manche (**Sans plier la lame de contact en cuivre**).
- 5.) Retirer la pile ou batterie (**Sans plier la lame de contact en cuivre**).
- 6.) Remplacer la pile ou la batterie (**Sans plier la lame de contact en cuivre**).
- 7.) Replacer l'ensemble Moteur et Pile ou Batterie avec la lame de contact en cuivre dans le manche.
- 8.) Replacer le mandrin sur l'axe du moteur sans forcer pour pouvoir le déposer ultérieurement plus facilement.
- 9.) Replacer la vis contact pour établir la continuité sans serrer trop fort.
- 10.) Tester la fraise.
- 11.) Dévisser doucement la vis contact jusqu'à arrêter le moteur.
- 12.) Replacer le capuchon de protection.
- 13.) La fraise d'Alger est prête...